

## 安思定專業版 清潔保養說明

更新日期：2020/12/31

版本：2020 V\_1

**注意** 懷孕或配戴心律調節器的患者不建議使用此儀器。

### 主機存放清潔



- 若超過一個月不使用，存放主機之前應先取出電池，其使用和儲存溫度為 0 ° C~36° C，相對濕度為 90% 以下，大氣壓力為 912~1115hPa。
- 清潔時，請使用乾布或微濕布輕輕擦拭其表面。使用強效清潔劑可能會損壞主機的外殼，切勿直接噴在設備上。
- 本產品為 LCD 螢幕，存放時請勿與其它尖銳物品（例如鑰匙）同時收納，如因重壓或尖銳物品摩擦造成螢幕破裂、損壞，將不在本產品保固範圍內。

### 耳夾存放清潔



- 耳夾上之白色棉片建議於每次使用後丟棄，並使用 75% 酒精清潔其金屬部位後再貼上新的耳夾棉片。如因故未能更換棉片，至少每三天更換一次耳夾棉片來維持耳夾的清潔和使用壽命。
- 非使用時，可將耳夾棉片移除，讓耳夾保持乾燥，並可將電線以圓形方式纏繞（如圖片）收納於收納盒中。
- 請勿以具有腐蝕性的溶液（例如酒精）擦拭導線，可使用一般濕布擦拭。
- 耳夾使用年限約為 12 個月，視使用與清潔保養狀況而定。
- 為確保治療效果，使用時請使用原廠導電溶液。
- 使用及收納時請避免拉扯、重壓。

### 電極貼片存放清潔



- 使用和儲存溫度為 0° C~36° C，避免日照。
- 非使用時，請將貼片與導線分開，並將貼片貼回塑膠片上收納。
- 貼片可重複使用至不再有黏性為止，視使用頻率與清潔保養狀況而定。
- 如黏性下降，可使用幾滴導電溶液。
- 非使用時可收納於冰箱冷藏，以延長其使用壽命。

### 電極導棒存放清潔



- 每次使用後請將導棒棉片取下，並使用 75% 酒精清潔金屬探頭。
- 導棒棉片建議每週更換一次。
- 非使用時，請將導棒與導線分開。



### 電極導線存放清潔



- 非使用時請將導線與貼片或導棒分開。
- 非使用時，可將電線以圓形方式纏繞（如圖片）收納於收納盒中。
- 請勿以具有腐蝕性的溶液（例如酒精）擦拭導線，可使用一般濕布擦拭。
- 使用及收納時請避免拉扯、重壓。

### 故障排除

- 感覺不到電流

**注意：**對於部分用戶來說，這是正常現象，尤其是在使用導棒探頭的情況下。

排除方式：增加電流或使用更多的導電溶液浸濕耳夾棉片或探頭棉片。

- 棉片粘貼不牢固

排除方式：

1. 確保耳夾電極殘膠清理乾淨。
2. 黏貼耳夾棉片至乾淨、乾燥的耳夾電極上。

- 治療探頭不導電

排除方式：

1. 使用多一點的導電溶液。
2. 換一根導線嘗試（檢查當前導線是否斷裂）。
3. 喝足夠的水，飲水不足會使身體導電效果較差。
4. 檢查電池是否有足夠的電量。

- 出現  圖示

排除方式：

1. 確保電極與皮膚接觸牢固。
2. 確保所有插頭與主機連接牢固。
3. 用多一點的導電溶液浸濕耳夾電極棉片或導棒電極棉片。
4. 如果電量太低，請更換電池。

- 沒有療效

排除方式：

1. 更改電極連接位置。
2. 治療所有疼痛部位。
3. 使用 安思定專業版 如果 0.5Hz 的頻率不起作用，換成 1.5Hz 或 100Hz 試試。
4. 調小電流，然後增加治療次數或延長治療時間。
5. 有些人可能需要連續治療 3 周或更長時間才會見效。
6. 向您的保健人員、授權代理商或 EPI 尋求建議。

