

安思定標準版簡易操作說明

更新日期：2020/12/31

版本：2020 V_2



標準版操作 5 步驟

1. 使用導電液沾濕耳夾上的棉片。
2. 使用清水或酒精棉片擦拭耳垂。
3. 將耳夾夾於耳垂。
4. 開啟電源，設定至舒適的電流等級，使用 20-60 分鐘。
 - a. 若使用 2.5 或以上等級，治療 20 分鐘
 - b. 若使用 2 或以下等級，治療 60 分鐘

恰當的電流等級

當開啟安思定時，預設電流等級是 1。緩緩增加電流到感受到些微暈眩(頭暈的感覺，類似在船上搖晃)，然後立即降低電流直到頭暈的感覺停止。

注意事項

1. 禁忌症：懷孕或配戴心律調節器的患者不建議使用此儀器。
2. 耳夾的白色棉片建議每三天更換，以確保導電作用是正常進行。
3. 請使用鹼性電池，每日使用約可使用 7-10 小時。



操作影片